

Nasenflügeltest – Ablaufplan


Hinweise für die Durchführung der Testung zu Hause:

Vorbereitung und Durchführung:


Damit die Testung an sich schnell erfolgen kann, sollten alle Teile vorab geöffnet werden:



1. **Antigen-Test-Card** (Testkassette - dort wo man das Ergebnis am Ende ablesen kann) auspacken und bitte nach der Testung für die Schule aufbewahren.
2. **Kanülen** jeweils eine Flüssigkeit hineinträufeln.
3. Den **Kindern die Stäbchenverpackung** leicht öffnen und sie diese dann eigenständig herausnehmen lassen.
4. Die Kinder sollten **dann jeweils 5 Umdrehungen** in jedem Nasenflügel dieses Stäbchen einführen.
5. Die Kanüle mit Flüssigkeit aushändigen und dort sollten die Schüler*innen das Stäbchen hineinstecken, **3-5 x herumdrehen** und etwa eine Minute in der Flüssigkeit stecken lassen.

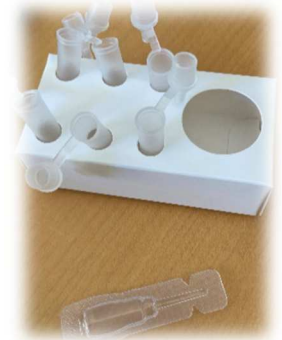

6. Im Anschluss Stäbchen entfernen und wegwerfen. Die Kanüle schließen und die Flüssigkeit in das **zugewiesene Antigen-Test-Card (Testkassette) – 3 Tropfen** hineinträufeln.
7. Nach **15-20 Minuten** nachsehen, wie das Ergebnis ausgefallen ist.
8. **Bei negativem Ergebnis – Testkassette mit in die Schule mitnehmen und der Lehrperson abgeben!**
9. **Bei positivem Fall – Lehrperson/ Sekretariat kontaktieren**

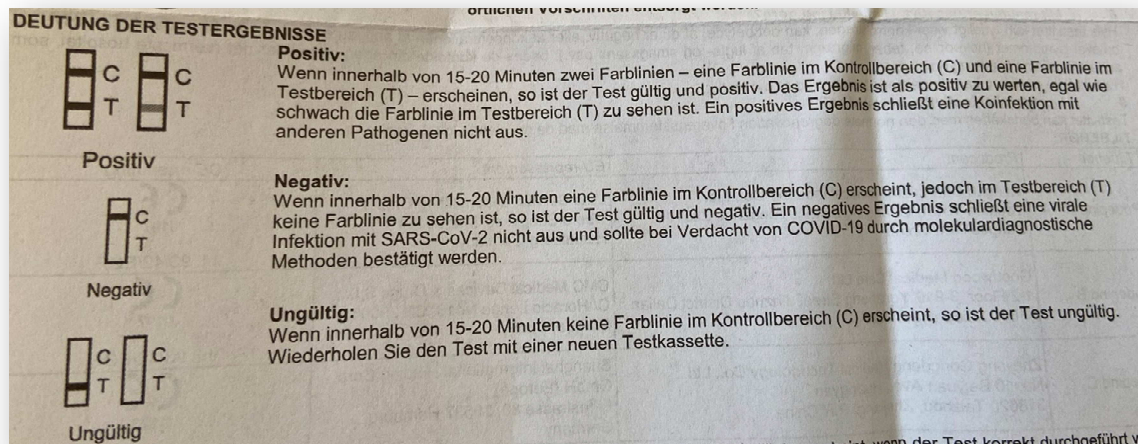

Gutes Gelingen!